



Leben in Bewegung

Gebrauchsanweisung

„Delta“



CE

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung	3
2. Lieferumfang	4
3. Beschreibung der Gehhilfe	4
4. Sicherheitshinweise	5
5. Indikation	5
6. Kontraindikation	5
7. Montage	6
7.1. Handgriffe montieren und Höhenverstellung	6
7.2. Tasche montieren	6
7.3. Einkaufskorb montieren	7
8. Einstellungen	7
8.1. Einstellen der Bremsen	7
9. Benutzung	8
9.1. Bremsen aus der Bewegung	8
9.2. Feststellbremsen	8
9.3. Zusammenfallen	9
9.4. Aufstellen	9
10. Reinigung / Desinfektion	10
11. Wiedereinsatz	10
12. Technische Daten	10
13. Wartung	11
14. Garantie	11

1. Vorbemerkung

Sehr geehrte Benutzerin,
sehr geehrter Benutzer,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses.

Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihrer Gehhilfe. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

2. Lieferumfang

Die Gehhilfe wird im Karton verpackt geliefert. Bewahren Sie den Karton nach Möglichkeit auf, da er zur evtl. späteren Einlagerung dient.

Nach Erhalt der Ware prüfen Sie bitte umgehend auf Vollständigkeit und Unversehrtheit des Produktes.

- 1 Verpackungs- und Transportkarton
- 1 Gehhilfe (vormontiert)
- 1 Einkaufskorb
- 1 Tasche
- 1 Tablett
- diese Gebrauchsanweisung

3. Beschreibung der Gehhilfe



Abbildung 1

4. Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vor der ersten Benutzung empfehlen wir den Umgang mit Ihrer Gehilfe auf ebenem und bekanntem Gelände zu üben um riskante Situationen zu vermeiden.

- Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass Ihre Gehilfe unversehrt ist und alle verstellbaren Teile ordnungsgemäß befestigt sind.
- Überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit der Bremsen.
- Achten Sie auf festen Sitz der Handgriffe.
- Beachten Sie, dass auf abschüssigem Gelände die Rollgeschwindigkeit höher werden kann als die eigene Schrittgeschwindigkeit. Sturzgefahr!
- Die Gehilfe ist nur von einer Person zu nutzen.
- Der Transport von schweren Lasten oder Personen ist nicht erlaubt.
- Das Kipprisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch abstützen auf einen Handgriff oder durch ungleiche Beladung des Einkaufskorbs vergrößert werden.
- Beim Zusammenklappen können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

5. Indikation

Die Gehilfe dient Personen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit als Unterstützung beim Gehen z.B. im häuslichen Bereich oder im Freien. Das Restleistungsvermögen des Anwenders muss dabei noch ohne Selbst- oder Fremdgefährdung, unter anderem zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, ein verlassen der Wohnung ermöglichen.

6. Kontraindikation

Die Verwendung der Gehilfe ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen

7. Montage

7.1. Handgriffe montieren und Höhenverstellung

- Die Gehhilfe wird weitestgehend vormontiert geliefert
- Stecken Sie die Handgriffe in die Rohrführung am Rahmen
- Befestigen Sie die Knebelschraube an der Vorrichtung (siehe Pfeil)
- Positionieren Sie die Handgriffe in der gewünschten Höhe

Die Handgriffe sind korrekt eingestellt, wenn Sie sich in der Höhe der Handgelenke befinden

- Fixieren Sie die eingestellte Höhe durch festziehen der Hebel auf beiden Seiten
- Achten Sie darauf, dass sich beide Handgriffe in gleicher Höhe befinden



Abbildung 2

7.2. Tasche montieren

- Um die Tasche zu montieren, legen Sie die Tasche an den Rahmen Ihrer Gehhilfe, wie auf der Abbildung dargestellt
- Befestigen Sie die Tasche mit Hilfe der Druckknöpfe am Rahmen
- Zum Abnehmen der Tasche lösen Sie die Druckknöpfe



Abbildung 3

7.3. Einkaufskorb montieren

- Um den Einkaufskorb zu montieren, hängen Sie diesen an den vorhandenen Haken am Rahmen ein
- Transportieren Sie nicht zu hohe Lasten
- Beachten Sie, dass sich durch hohe Lasten das Kipprisiko erhöht
- Auf den Korb kann das Tablett verrutschsicher aufgelegt werden
- Zur Demontage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor



Abbildung 4

8. Einstellungen

8.1. Einstellen der Bremsen

- Die Stärke der Bremse kann individuell eingestellt werden
- Drehen Sie dazu die sich am Bowdenzug befindlichen Rändelmuttern auseinander (Bremse härter) oder hinein (Bremse weicher)
- Die Bremsklötze dürfen ohne Betätigung nicht das Laufrad berühren



Abbildung 5

9. Benutzung

9.1. Bremsen aus der Bewegung

- Um die Geschwindigkeit aus dem Gehen zu reduzieren, betätigen Sie den Hebel am Handgriff
- Ziehen die dazu den Griff mit den Fingern zu sich nach oben
- Dabei werden beide Hinterräder abgebremst

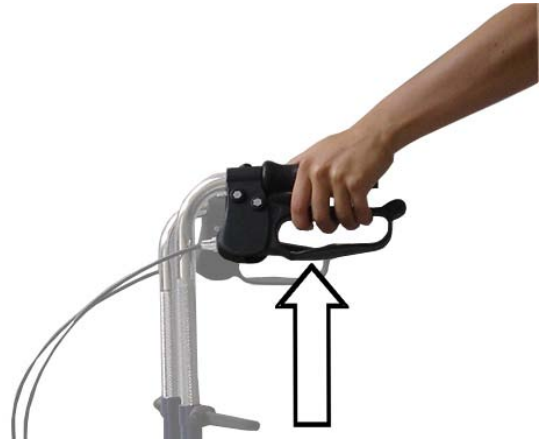


Abbildung 6

9.2. Feststellbremsen

- Um die Feststellbremse zu betätigen, drücken Sie den Bremshebel nach unten
- Um diese wieder zu lösen, betätigen Sie die Bremse wie gewohnt
- Achtung! Betätigen Sie die Feststellbremse nie aus der Bewegung heraus



Abbildung 7

9.3. Zusammenfallen

- Positionieren Sie Ihre Gehhilfe vor sich und betätigen Sie wie im Abschnitt 9.1 beschrieben die Bremsen
- Falls montiert, entfernen Sie den Korb und das Tablett, die Tasche muss leer sein
- Fassen Sie den Knauf an der Querstrebe wie auf der Abbildung dargestellt an
- Lösen Sie die Sicherung und falten sie die Gehhilfe an den Griffen zusammen



Abbildung 8

9.4. Aufstellen

- Zum Aufstellen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor
- Fassen Sie den Knauf an der Querstrebe, wie auf der Abbildung dargestellt, an
- Falten Sie die Gehhilfe an den Handgriffen auseinander
- Betätigen Sie die Verriegelung an der Querstrebe
- Beim Verriegeln spüren Sie einen kleinen Widerstand
- Nun können die Tasche, Korb und Tablett wieder montiert werden



Abbildung 9

10. Reinigung / Desinfektion

Die Gehhilfe sollte regelmäßig gereinigt werden. Die Desinfektion ist mindestens bei Patientenwechsel durchzuführen.

- Die Rahmenteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden.
- Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (Achtung! Keine Drahtbürste verwenden)
- Zur Desinfektion der Handgriffe sowie der Sitzfläche verwenden Sie ein handelsübliches Flächenreinigungsmittel.

11. Wiedereinsatz

- Die Gehhilfe ist für den Wiedereinsatz geeignet.
- Beachten Sie, dass Sie auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden.
- Die Gehhilfe sollte vor der Weitergabe gereinigt und desinfiziert werden und durch den Fachhandel auf Schäden geprüft und freigegeben werden.

12. Technische Daten

Delta	
Bereifung	PU-Bereifung
Material	Stahlrahmen (lackiert) Tablett PE
Farbe	dunkelblau
Schiebegriffhöhe (cm)	82 - 97
Gesamtbreite (cm)	66
Gesamtlänge (cm)	58
Gesamthöhe (cm)	96
Gewicht mit Zubehör (kg)	7
Zuladung Einkaufskorb (kg)	5
Max- Belastbarkeit (kg)	110

13. Wartung

Die Gehilfe ist weitestgehend wartungsfrei konzipiert. Falls eine Instandsetzung erforderlich sein sollte, lassen Sie diese nur von Ihrem Fachhändler durchführen. Auf Anfrage des Fachhandels, lassen wir Ihnen gerne weitere Unterlagen für Reparaturen und Instandsetzung zu kommen.

14. Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierölen bzw. Fetten.

Ihr Fachhändler:

Trendmobil GmbH

Frohling 24

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-9359-0

Telefax: +49 (0) 5254-9359-29

E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com