

ROLLATOR ONO

ONO ist ein Rollator aus Stahlrohr mit schwenkbaren Vorderrädern. Er läßt sich leicht auseinander- und zusammenfalten. Die Bremse erfordert nur wenig Muskelkraft und funktioniert als Fahr- und Parkbremse. Der ONO ist TÜV+GS/CE-geprüft und damit sicher im Gebrauch. Der ONO ist für ein Benutzergewicht von max. 125 kg zulässig. Das Gewicht beträgt 8,2 Kg. Korb und Tablett gehören zur Standardausstattung.




INBETRIEBNAHME

Falten Sie den ONO auseinander, montieren Sie die Schiebegriffe (s. Höhenverstellung) und stellen Sie die Bremse ein (s. Bremseinstellung), schon ist der ONO fahrbereit.

Zusammenfalten: ONO bremsen, einen Schiebegriff festhalten und zugleich die Entriegelung lösen, um das Sitzbrett nach oben zu klappen.


Auseinanderfalten: ONO bremsen, einen Schiebegriff festhalten und zugleich den Sitzbrett nach unten klappen.

Zu beachten: Das Sitzbrett muß vollständig heruntergeklappt sein, wenn der Rollator benutzt wird.

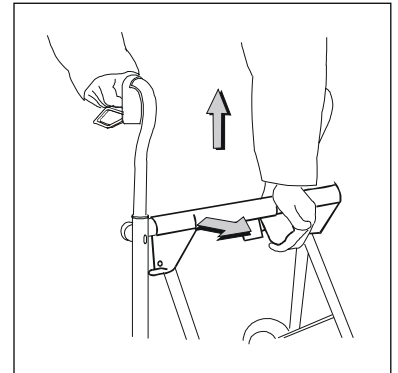


HÖHENVERSTELLUNG

Die Schiebegriffe sind in einer Höhe von 75 bis 100 cm verstellbar. Dazu den Bremsgurt lockern, Knebelschrauben ganz lösen und die gewünschte Höhe einstellen. Der obere Teil des Schiebegriffs sollte ungefähr auf Höhe der Handgelenke liegen. Danach die Knebelschraube wieder einsetzen und fest anziehen. Zum Schluss noch die Bremse justieren. Falls der Rollator nach einiger Zeit instabil wirkt, überprüfen Sie, ob die Schrauben richtig festgezogen sind.

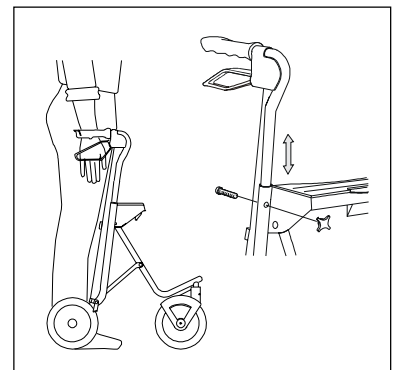

BREMSEINSTELLUNG


Wenn die Griffhöhe verändert wird, muss auch die Bremse eingestellt werden. Um die Bremse einzustellen, stellen Sie die Bremse auf "Park-Position" und ziehen den Bremsgurt fest. (Siehe "Bedienung der Bremse" im Handbuch). Prüfen Sie die Bremse und stellen Sie die gegebenenfalls nach.

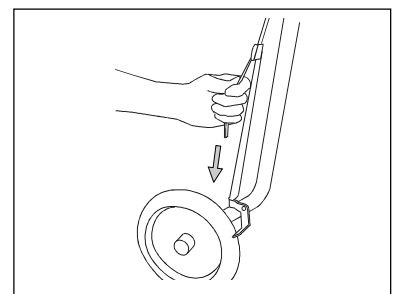

BENUTZUNG DER BREMSE


Der Bremsgurt hat zwei Funktionen:

1. Wenn Sie nach oben ziehen, verlangsamen Sie die Fahrt (Fahrbremse). Damit Sie leichter um eine Kurve fahren können, ziehen Sie bei einer Linkskurve den linken Bremsgurt, bei einer Rechtskurve den rechten Bremsgurt.
2. Drücken Sie den Bremsgurt nach unten, ist die Bremse festgestellt (*Parkbremse*). Zum Lösen der Bremse, den Bremsgurt einfach wieder nach oben ziehen.

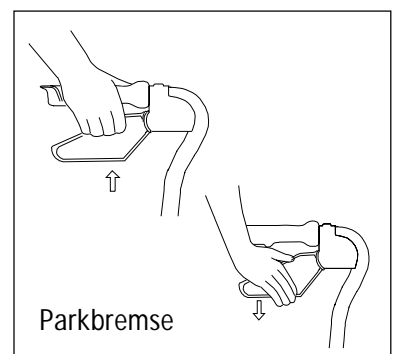

DAS SOLLTEN SIE BEACHTEN:

- Wenn der Korb schwer beladen ist, vorsichtig fahren, weil sich hierdurch die Fahreigenschaften ändern können. Dies gilt insbesondere beim Fahren über Schwellen und Bürgersteigkanten.
- Der Korb darf mit höchstens 10 kg Gewicht beladen werden.
- Wenn Sie sich auf das Sitzbrett setzen, arretieren Sie vorher den Rollator. (Parkbremse)
- Der Rollator ist nicht zur Personenbeförderung vorgesehen.
- Wenn der Rollator eine Treppe hinauf- oder hinabgetragen wird, bitte vorher zusammenfalten.
- Bei Fahrten auf abfallenden Wegen wird um Vorsicht gebeten.
- Der vordere Rahmenteil darf nicht mit schweren Gegenständen beladen werden.

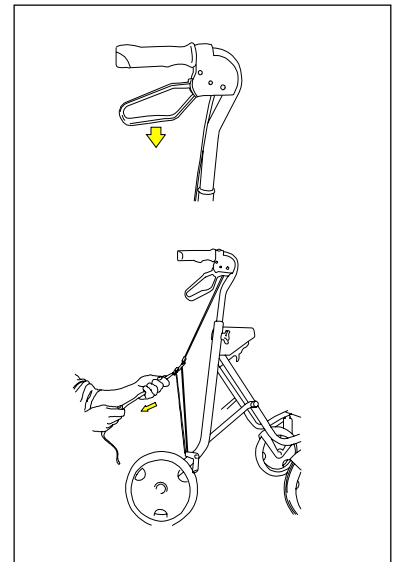

ONO ZUBEHÖR (OPTION)

Gehstock-Halter: bestehend aus 2 Teilen, sowohl für die rechte als auch für die linke Seite.

Sauerstoffflaschenhalter: wird in die Vorderseite des Sitzbrettes eingehangen, mit einer max. Gewichtsbelastung der Flasche von 5 kg

Schleifbremse: greift beim Betätigen der Bremse auf das Hinterrad zu.

Rückenlehne: wird unterhalb der Handgriffe rechts und links montiert

Sitzpolster, groß



GARANTIE

Der Rollator wurde getestet und erfüllt die Anforderungen gemäß: prEN ISO/DIS 11199-2.
Auf das Bremssystem und den Rahmen gewähren wir mit 5 Jahre Garantie.

PFLEGEHINWEISE

Der Rollator kann mit Autopflege- oder Spülmittel abgewaschen werden. Bei grober Verschmutzung empfiehlt sich Fettlöser. Höchste Washtemperatur 80°.

Achtung! Die Schraube, die den vorderen Radschutz hält, ist geleiht und darf nicht gelockert oder angezogen werden. Bei Austausch des Radschutzes muß auch eine neue Schraube eingesetzt werden. Falls Ihr Rollator nicht funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Ein defekter Rollator darf nicht angewendet werden. Zur Reparatur dürfen nur Originalersatzteile von ETAC verwendet werden. Sollten andere Teile verwendet werden, übernimmt ETAC keine Haftung für Funktion und Sicherheit.

Achtung! Spiritus oder Lösungsmittel dürfen nicht bei der Reinigung verwendet werden.

