

Mobilex Rollator "Zebra" und "Zebra MAX" Art. 312001..04 und 312009

Montage- und Gebrauchsanleitung



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex-care.com

1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Mobilex Produkt entschieden und darüber freuen wir uns sehr. Diese Gebrauchsanleitung enthält eine genaue Beschreibung des Produktes und wichtige Hinweise für dessen korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie daher vor Gebrauch des Produktes diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie bitte alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit um einen sicheren und dauerhaften Einsatz des Produktes zu gewährleisten.

Zweckbestimmung

Der Rollator "Zebra" wurde für den Gebrauch im Innen- oder Außenbereich entworfen. Er soll zum Ausgleich einer Behinderung oder Unfähigkeit dienen, sowie die Bewegungsfreiheit des Benutzers erweitern. Der Rollator ist nur für die Benutzung durch eine einzelne Person ausgelegt.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S

Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Bitte nutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Einsatzbereich
- An allen Gelenken des Rollators besteht erhöhte Klemm- und Quetschgefahr
- Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion beider Radbremsen
- Benützen Sie den Rollator nur im vollständig aufgeklappten Zustand und mit verriegeltem Klappmechanismus
- Benutzen Sie den Rollator nur auf geradem, festen Untergrund
- Den Rollatorsitz nur bei verriegelten Bremsen benutzen
- Immer beide Bremsen gleichzeitig ziehen oder verriegeln
- Der Rollator "Zebra" darf nicht mit mehr als 120 kg insgesamt belastet werden
- Der Einkaufskorb darf maximal mit 7 kg belastet werden
- Das Tablett darf nur für leichte Gegenstände verwendet werden
- Es darf keine weitere Person auf dem Sitz mitgenommen werden

3. Beschreibung

Produkt Beschreibung

Der Mobilex Rollator "Zebra" hat einen silberfarbenen Aluminiumrahmen mit 4 Rädern zu je 185 mm Durchmesser. Er ist mit 2 feststellbaren Bremsen ausgestattet und kann zusammengeklappt werden.

Montagehinweise

Die Mobilex Rollator "Zebra" wird verpackt in einem Karton mit folgendem Lieferumfang ausgeliefert:

- ✓ 1 Rollator
- ✓ 1 Ablagetablett für den Rollatorsitz
- ✓ 1 Einkaufskorb
- ✓ 1 paar Schiebestangen/Lenker mit Rückengurt
- ✓ 2 Handmuttern
- ✓ diese Gebrauchsanweisung

Die Schiebestangen (Lenker) mit dem Rückengurt müssen in den Rahmen eingeführt werden, auf die gewünschte Höhe gebracht und mit den beigegepackten Handmuttern verriegelt werden. Den Einkaufskorb und das Ablagetablett montieren.



Funktionsbeschreibung

Durch den klappbaren Hinterradrahmen kann der Rollator platzsparend zusammengeklappt werden. Die Schiebestangen (Lenker) lassen sich durch die stufenlose Höhenverstellung an Ihre Körpergröße anpassen. Die Sitzfläche ermöglicht Ihnen, Ruhepausen einzulegen.

Handhabung beim Transport

Für einen einfacheren Transport kann der Rollator zusammengeklappt werden.

Optionen / Zubehör Für den Mobilex Zebra Rollator ist verschiedenes Zubehör lieferbar (Stockhalter, Geschwindigkeitsreduzierbremse, u.a.) Bitte wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

4. Technische Daten

Zebra Rollator	Zebra Standard Art.Nr. 312001	Zebra klein Art.Nr. 312002	Zebra breit Art.Nr. 312004	Zebra MAX Art.Nr. 312009
Schiebestangen Höhe (einstellbar)	83,5 - 98 cm	70 - 80 cm	83,5 - 98 cm	85 - 95 cm
Sitzhöhe (einstellbar)	58 - 63 cm	48 cm (fest)	58 - 63 cm	60 cm (fest)
Sitzbreite	45 cm	45 cm	50 cm	56 cm
Gesamtbreite	55 cm	55 cm	60 cm	67 cm
Gesamttiefe (geschlossen/offen)	65 / 76 cm	65 / 76 cm	65 / 76 cm	65 / 76 cm
Gewicht	7,4 kg	7,0 kg	7,7 kg	9,2
Max. Benutzergewicht/Tragfähigkeit	120 kg	120 kg	120 kg	150 kg

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich an der vorderen Rahmenquerstrebe

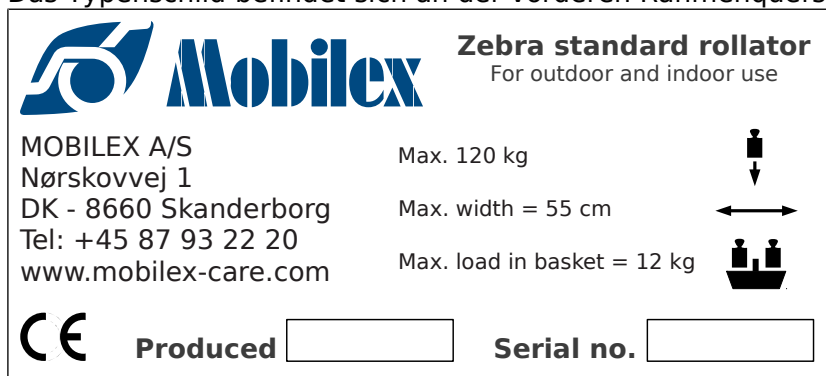


Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen (mind. 1x jährlich) von einem Fachmann kontrollieren zu lassen. Diese jährliche Prüfung sollte folgende Kontrollen umfassen: Sichtprüfung aller Rahmenteile auf Verformung, Beschädigung, Verschleiß und Korrosion, sowie insbesondere Kontrolle von:

- ✓ Rollator Fahrgestell
- ✓ Schiebestangen (Lenker) und Griffe
- ✓ Bremshebel und Bremszüge
- ✓ Lenkgabeln und Lenkräder
- ✓ Bremsräder
- ✓ Sitzfläche mit Verriegelungsmechanik
- ✓ Einkaufskorb und Ablagetablett
- ✓ Alle Verbindungselemente (z.B. Mutter, Schrauben, Nieten ...) auf Vollständigkeit, Funktion und einwandfreien Sitz prüfen
- ✓ Funktion der Bremse prüfen auf:
 - Abbremsen aus der Fahrt
 - Feststellen der Bremsräder

6. Allgemeine Problembhebungen

<i>Problembeschreibung</i>	<i>mögliche Ursache</i>	<i>was ist zu tun</i>
der Rollator lässt sich nur schwer lenken oder schieben	Verschmutzungen zwischen Rädern und Gabeln	etwaige Verschmutzungen oder Haare zwischen Rad und Gabel entfernen
die Bremsen greifen nicht oder greifen nur einseitig	Bremsklötze abgenutzt oder Bremsen schlecht eingestellt	Einstellung der Bremsen kontrollieren, evt. Bremsklötze wechseln (→ Servicecenter)
der Sitz rastet beim Aufklappen nicht richtig ein	Verriegelungsmechanik nicht richtig eingestellt oder defekt	Einstellung der Verriegelungsmechanik kontrollieren oder austauschen (→ Servicecenter)

7. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

8. Garantie

Mobilex A/S gewährt auf alle vertriebenen Produkte eine Garantie gegen Material- oder Produktionsfehler für die Dauer der in den jeweiligen Ländern gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeit. Mobilex A/S übernimmt keine Gewährleistung für Schäden die aus unsachgemäßer oder nicht fachgerechter Montage und/oder Reparatur, durch Vernachlässigung und Verschleiß, sowie durch Veränderungen von Baugruppen durch den Benutzer oder Dritte entstanden sind. In diesen Fällen erlischt die CE Kennzeichnung und die Produkthaftung.

Die Garantie deckt keine Transportkosten sowie Schadensersatzansprüche die auf Nicht-Nutzung des Produktes während der Reparaturzeiten zurückzuführen sind. Des weiteren besteht keine Gewährleistung für Schäden die aus Nichtbeachtung oder Missverständnissen dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Bei Entdecken von Material oder Produktionsfehlern setzen Sie sich bitte sofort mit ihrem Händler oder direkt mit Mobilex A/S in Verbindung.

9. Konformitätserklärung (CE)


Die Firma Mobilex A/S, Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Dänemark erklärt hiermit, dass das Produkt

Mobilex Rollator "Zebra" Art. 312001..04 und 312009

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des EU Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte
Anhang I vom 14 Juni 1993**

Lars Nygaard
Geschäftsführer
Mobilex A/S

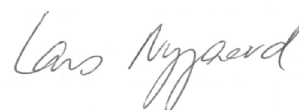

Skanderborg, am 21.08.2006

.....
Unterschrift