

## Eintragezeiten bei Neuanfertigung diabetesadaptierter Bettungen, Thereschuhen und orthopädischen Maßanfertigungen

1. Tag am Vormittag: 15 min., anschließend **SICHTKONTROLLE** ohne Strümpfe  
 1. Tag am Nachmittag: 30 min., anschließend **SICHTKONTROLLE** ohne Strümpfe
2. Tag am Vormittag: 30 min., anschließend **SICHTKONTROLLE** ohne Strümpfe  
 2. Tag am Nachmittag: 90 min., anschließend **SICHTKONTROLLE** ohne Strümpfe
3. Tag am Vormittag: 180 min., anschließend **SICHTKONTROLLE** ohne Strümpfe
- ab 3. Tag: unbegrenzte Tragezeit bei ständiger, allabendlicher **SICHTKONTROLLE** beider Füße  
 wenn erforderlich, unter Zuhilfenahme eines Spiegels für die Fußsohle und Ferse

Beginnt die Ersttragezeit am Nachmittag, verschieben sich die Zeiten entsprechend.

- 1) Bei Hautstörungen und Reizungen setzen Sie sich bitte unmittelbar mit uns oder Ihrem behandelnden Arzt in Verbindung.
- 2) Bei Durchfeuchtung des Hilfsmittels trocknen Sie es langsam und nicht auf Heizung oder Ofen.
- 3) Bei offenen Ulcera (Sekretabsonderung) und Kork-Lederdecken reklamieren Sie bitte bei uns eine reinigungsfähige Einlagenabdeckung.
- 4) Achten Sie auf scharfe Kanten und Druckstellen, die durch das Trocknen entstehen können.
- 5) Achten Sie auf Futter- und Strumpffalten.
- 6) Pflegen Sie das Oberleder mit Schuhpflegemittel, damit es weich und geschmeidig bleibt.
- 7) Benutzen Sie keine scharfen und ätzenden Flüssigkeiten zum Reinigen.
- 8) Benutzen Sie bitte nur weiche Schuhspanner zum Ausfüllen der Schuhe.
- 9) Gehen Sie bitte regelmäßig zur Kontrolle des Hilfsmittels (3-4 Monate).
- 10) Schließen Sie alle Verschlüsse und Schnürungen gleichmäßig, so dass sich der Druck über die ganze Verschlussfläche auch gleichmäßig verteilt.
- 11) Setzen Sie dabei die Ferse auf und drücken den Fuß soweit wie möglich nach hinten, um einen zu losen Sitz im Hilfsmittel zu verhindern (**Scheuergefahr**).
- 12) Achten Sie auf Steinchen, Schmutz etc. im Schuh durch Abtasten.